

操作说明

Lumify 超声诊断系统

2017 年 9 月 25 日

4535 619 44071 Rev A

关于操作说明

操作说明包括澄清一些可能使用户误解或造成用户使用困难的软件响应信息。请仔细阅读操作说明并自己保留一份以供参考。如果需要，可以将操作说明张贴在您的工作站旁边。

标签信息

为方便记录，请保留包装中的 *Quick Start Guide*（快速入门指南）；该指南包含 Lumify 超声诊断系统的标签信息。

执行检查

- 在使用 L12-4 探头时，如果调整后的深度小于 3 cm，系统会缩放图像，部分图像可能无法显示。要查看完整图像，请合拢拇指和食指。
- 如果您将测量测径仪拖至图像区域外，测径仪可能会消失。要恢复测径仪位置，请执行以下任一操作：

- 在 2D 模式下，依次触按测量  和全部清除 ，然后再次触按测量 ，添加椭圆或距离测量。
- 在 M 型模式下，触按测量 ，然后再次触按测量 .

回顾图像

在已选中**新添目的地**对话框中的相应设置，或编辑导出目的地的情况下，如果您旋转设备，系统不会保存您的选择。要避免此情况，请不要在添加或编辑导出目的地时旋转设备。

探头

Samsung S2 平板电脑 T710 型号和 T810 型号与 C5-2 和 L12-4 探头兼容，但与 S4-1 探头不兼容。较新的 T713 型号和 T813 型号平板电脑与 S4-1 探头完全兼容。

用户信息更改

以下信息用于取代或补充最新版 *Lumify 超声诊断系统用户手册* 中的信息。

请先阅读此部分



警告

禁忌（仅适用于加拿大）：该设备禁用于眼睛或任何使超声波束穿过眼睛的应用。

“用户信息组成部分”主题应包括以下内容：

- *超声诊断系统和探头的保养和清洁：*随产品提供，也包含在 CD 上。介绍探头的保养和清洁操作。
- *适用于超声诊断系统和探头的消毒剂 and 清洁溶液：*随产品提供，也包含在 CD 上。提供有关适用于探头的清洁和消毒产品的信息。

安全



警告

扫描患者时请勿进行充电。

除“符合电磁标准的线缆”主题中所列的线缆以外，以下线缆也同样可用：

线缆	长度	Philips 部件编号
USB Micro-B 探头线缆（C5-2、L12-4、S4-1）	1.75 m (5.7 ft)	453561871781
USB-C 探头线缆（C5-2、L12-4、S4-1）	1.75 m (5.7 ft)	453561854691

诊断系统概述

在“系统设置”主题中，应包含以下附加设置：

名称	说明
Cardiac Image Orientation	允许您在 心脏 预设中颠倒图像左 / 右取向。要颠倒图像左 / 右取向，选择 心脏左 / 右反转 。

使用系统

在“将设备的摄像头用作条码扫描仪”主题中，步骤 4a 应为：

键入一个描述条码配置的名称并触按**继续**。Lumify 根据条码显示患者信息字段。

执行检查

在“使用 M 型模式”主题中，步骤 5 应为：

要回顾 M 型模式描记，请触按 ，然后拖动循环时间线前后滚动。

回顾图像

- 在“配置导出目的地”主题中，步骤 7 应为：
要指定默认导出目的地，请从**检查完毕时，动态图像和图像自动输出到**菜单中选择一个选项。
- 在“启用 DICOM 日志记录”主题中，步骤 3 应为：
要查看日志，请触按**查看自 [日期和时间]**的日志。

