

Découvrez l'Amara View

Avec un positionnement sous le nez, l'Amara View est le seul masque naso-buccal conçu pour ne laisser aucune marque rouge sur l'arête nasale.

Confort innovant

Positionnement sous le nez conçu pour éviter les marques rouges, l'inconfort ou l'irritation sur l'arête nasale.

Légèreté

Taille et poids réduits pour plus de confort.

Utilisation facile

Languettes de retrait et de mise en place rapides.



Champ de vision dégagé

Absence de cale frontale permettant de porter des lunettes, lire, ou regarder la télévision.



1. Validation des bénéfices du masque Amara View. Experienced OSA Patients White Paper, Internal Version_FR_PN471377_LR_Final
2. Pression Positive Continue
3. Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l'inspiration et à l'expiration sans impacter l'efficacité du traitement.
4. Etude de validation d'une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1, Dernis JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France
5. 4 fois plus de patients adhérent à leur traitement à 90 jours avec DreamMapper.
Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur un groupe de 173 000 patients américains de la base de données EncoreAnywhere de Philips Respironics a n de déterminer si la possession de l'application DreamMapper a entraîné une différence dans le taux d'adhésion au traitement par PPC par rapport aux patients n'ayant pas DreamMapper.
6. Effect of oropharyngeal exercises on patients with moderate Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Katia C. Guimaraes1, Luciano F. Drager, Pedro R. Genta, Bianca F. Marcondes, and Geraldo Lorenzi-Filho, publié le 19 février 2009 sur HYPERLINK «<http://www.atsjournals.org>» www.atsjournals.org
7. Interview du Docteur Daniel Piperno, pneumologue à Lyon, publiée le 10 janvier 2017 sur le site internet <http://www.allianceapnees.org>

Amara View est un masque naso-buccal destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Le système DreamStation et DreamStation Go est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM, fabriqués par Philips, de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d'apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM, conçu par Philips, de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Date de mise à jour : 15/12/2017

PHILIPS

Apnée du sommeil et insuffisance respiratoire

Amara View

Le masque naso-buccal sans appui sur l'arête nasale.

Vous aider à mieux vivre le traitement

 **2 patients sur 3 rencontrent des difficultés avec le masque***:

- Encombrement, claustrophobie
- Inconfort
- Marques sur l'arête nasale
- Fuites
- Impossibilité de porter des lunettes

Chez Philips, nos équipes pluridisciplinaires (cliniciens, chercheurs, designers, dermatologues...) ont pour mission de concevoir de nouvelles solutions pour vous aider à mieux vivre le traitement au quotidien.

L'Amara View a été développé pour vous offrir :

- une vision 100% dégagée
- un confort innovant
- une taille réduite et un poids léger
- plus d'étanchéité
- la possibilité de porter des lunettes

SOURCE : AUTO

* Etude Junicon/Philips menée en France en septembre 2014 auprès de 102 patients.

innovation  you

Mon Amara View en 6 étapes



1 Clip du harnais

Pour le déconnecter, saisir et tourner le clip en direction opposée de la coque.



4 Réglage des sangles

Tirer les sangles inférieures et supérieures vers l'arrière pour les ajuster à égalité.

Astuce : Tirer sur la sangle au-dessus de la tête pour ajuster le masque si besoin.



2 Position du coussin

Maintenir délicatement le masque sur votre visage et placer le coussin en dessous de votre nez. Maintenir le masque en place et remonter le coussin.

Note : ne pas placer le coussin sur votre nez, mais en dessous, juste posé sur vos narines.



5 Mise en place du masque

Maintenir le masque en place et appuyer sur les clips pour la mise en place.



3 Position du harnais

Desserrer le harnais en allongeant les sangles. Faire passer le harnais par-dessus votre tête. Tenir le masque contre votre visage.



6 Ajustement

Tirer délicatement sur le masque pour l'ajustement final.

Astuce : Ne pas trop serrer, l'espace de 2 doigts doit passer entre la peau et le harnais.

Retrouvez nos tutoriels vidéo Amara View et les réponses à vos questions pratiques sur www.philips.fr/amaraview



Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif.



“Je l'ai essayé et c'était parfait”⁽¹⁾.

Viviane, utilisatrice du masque de nouvelle génération Amara View.

Retrouvez le témoignage vidéo de Viviane sur www.philips.fr/AmaraView

Bien choisir l'appareil de PPC⁽²⁾ peut faciliter votre acceptation du traitement.



Choisissez la PPC adaptée à votre mode de vie :

- Discrétion du design
- La bonne pression au bon moment pour une respiration sous PPC plus naturelle^(3,4)
- Accès facile aux données du traitement (IAH, heures d'utilisation, fuites)

Pour en savoir plus : www.philips.fr/DreamStation
www.philips.fr/DreamStation-Go

Optimiser les bénéfices du traitement par PPC.

Découvrez DreamMapper et Booster Tonic : les applications conçues par Philips pour vous aider à adopter durablement de nouveaux comportements.

- DreamMapper a été conçue pour vous aider à rester motivé et à mieux suivre votre traitement au quotidien.⁽⁵⁾
- Booster Tonic a été conçue pour vous aider à reprendre une activité physique régulière et améliorer votre qualité de vie. Découvrez notamment des exercices de kinésithérapie linguale.^(6,7)

Pour en savoir plus : www.philips.fr/dreammapper - www.philips.fr/BoosterTonic



Prenez votre traitement en main, parlez-en à votre médecin !