


# ● 酸素濃縮装置の日常のお手入れ

**チェック** 酸素濃縮装置の使用前、使用後に確認して下さい。**洗浄** 週に1回以上、必ず行って下さい。

## フィルター

**チェック** 掃除機でほこりを吸い取って下さい。

**洗浄** 週に1度は水洗いをして、充分乾燥させてから使用して下さい。

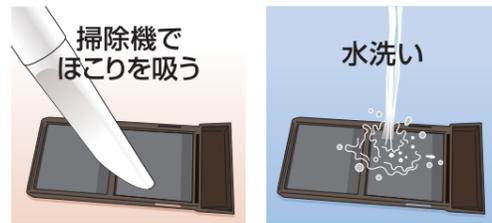

## カニューラ

**チェック** 鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、こまめに洗いましょう。



## 加湿器

必ず精製水を使用し、加湿器の「上の水位」まで入れて下さい(精製水は薬局で購入できます)。

**チェック** 精製水が「下の水位」より少なくなったら補充して下さい。

**洗浄** 加湿器を水洗いし、精製水を交換して下さい。

**注意** 加湿器のフタを「カチッ」と音がするまでまわしてしっかりと閉めます。機器本体取り付け位置に2本の穴をあわせ、キャップ部を「カチッ」と音がするまで押し込みます(押し込んだ後、加湿器を引き、確実に接続された事を確認して下さい)。



## 酸素濃縮装置についてのお問合せ

備品の購入や機器のトラブルなど、お問合せは下記にご連絡下さい。お問合せの際は、お名前・ご利用の機器名・かかりつけ医療機関名・取扱業者名などを必ずお伝え下さい。

■ 機器のトラブルは...24時間対応、安心の技術サポート

平日9:00~17:30 地域営業所・出張所・駐在

夜間・土日受付 営業所・出張所・駐在の対応日・対応時間外 受付

**機器安全センター 0120-633-881**

販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**  
 本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで  
 ※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています  
[www.philips.co.jp/SRC-Office](http://www.philips.co.jp/SRC-Office)

製造販売業者  
**株式会社医器研**

● フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

● かかりつけ医療機関名

© 2019 Philips Respiration GK PN 1117548/190110 R4-W



# O2グリーンいぶき5SPの使い方

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧下さい。

医療機器認証番号：221AGBZX00301

## ■ ご使用の際には以下の事にご注意下さい。

- ・ 停電用に携帯用の酸素ポンベを用意しておきましょう。
- ・ 酸素濃縮装置は換気のよい所に設置しましょう。
- ・ 定期的にフィルターを掃除しましょう。
- ・ 加湿器の精製水を定期的(1週間に2~3回)に交換しましょう。

## ■ 酸素はおくすり! 医師の処方流量を必ず守りましょう。

酸素はおくすりと同じで、体に必要な量をおぎなう為に処方されています。しかし「息切れ」は必ずしも酸素不足だけが原因で起こるものではありません。


「息切れ」が強いからといって勝手に酸素流量を変えてはいけません。



5L器 酸素濃縮装置  
**O2グリーンいぶき5SP**

## ⚠️ 火気からは2m以上離れてご使用下さい。

酸素自体が爆発したり、燃えたりはしませんが、燃えているものをさらに燃えやすくする性質があります。

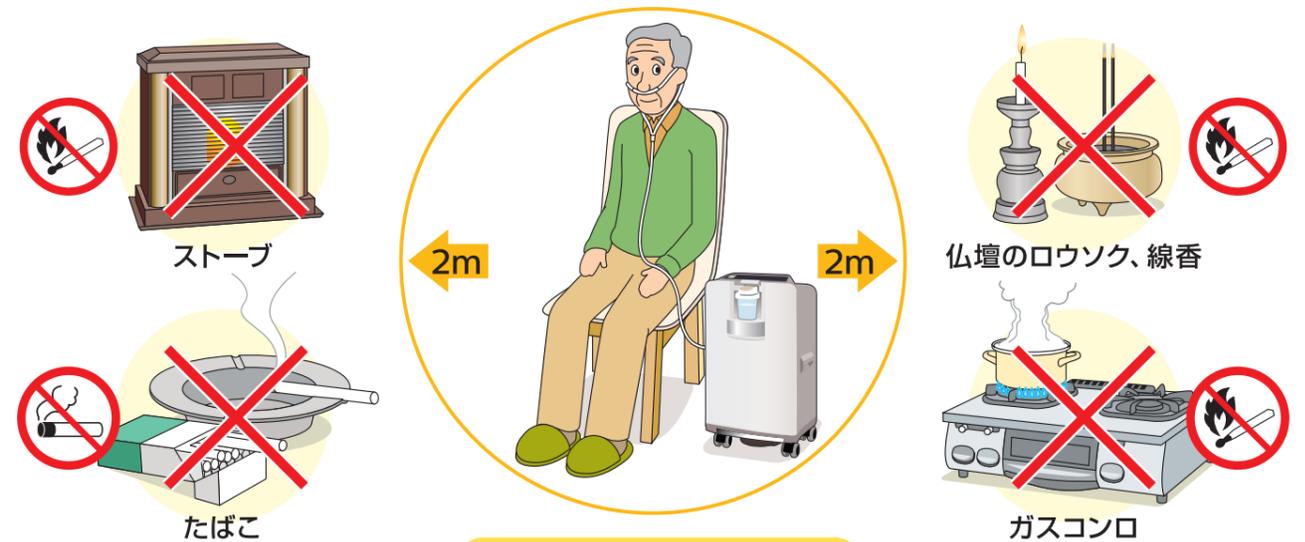

**周囲2m以内に  
 火気を置かないで下さい**



※平成元年11月8日元保安第69号通商産業省立地公害局保安課長通達  
 「在宅酸素療法用酸素及び装置取扱安全基準」より

## たばこは**厳禁!**

酸素吸入しながらたばこを吸うことは、健康面からも絶対にやめましょう。カニューラに引火することもあり、大変危険です。

# ● 酸素濃縮装置の使い方

※O2グリーンいぶき 5SPには音声ガイダンスが付いています。  
音声ガイダンスに従ってご使用下さい。

1 電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。

**注意** たこ足配線(ほかの機器との併用)はやめましょう。



2 電源ボタンを押して下さい。




3 流量ボタンを押し、処方された流量を正しくセットして下さい。



4 カニューラを装着し、酸素吸入をはじめして下さい。

**確認** 酸素が流れていない?と思ったらカニューラの鼻につける部分をコップの水に入れ、気泡(ブクブク)が出ていれば正常です。

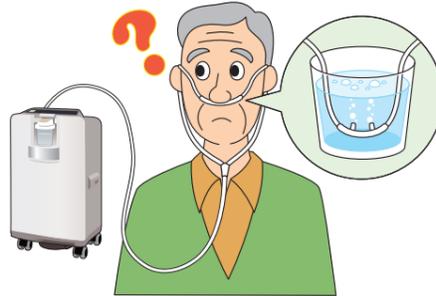

5 使用していないときは電源ボタンを押して電源を切って下さい。

**確認** 医師により指示された所定時間を守って吸入して下さい。




# ● カニューラの使い方


1 カニューラの方  
を確認し、鼻孔に  
装着します。



2 左右の耳にカニューラをかけます。

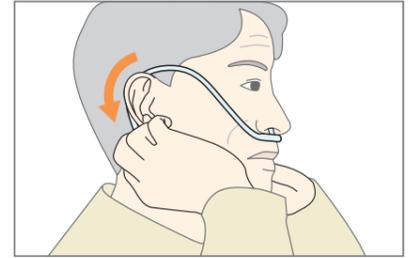

3 ストッパーを上げます。

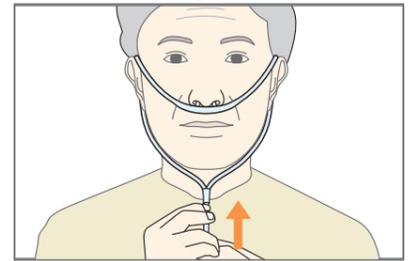

**!** 使用前に必ずチューブの点検を行って下さい。

