


● 酸素濃縮装置の日常のお手入れ

洗 浄 週に1回以上、必ず行って下さい。

フィルター


掃除機でほこりを吸い取って下さい。

洗 浄 週に1回は水洗いをして、充分乾燥させてから使用して下さい。

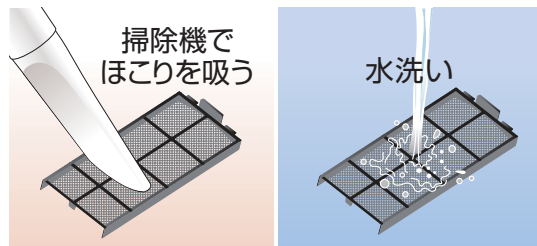

カニューラ

鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、こまめに洗いましょう。

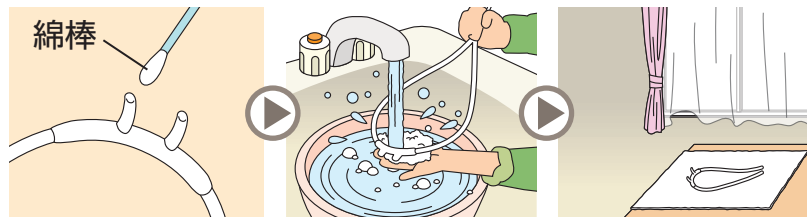

加 湿 器

必ず精製水を使用し、加湿器の「上限水位」まで入れて下さい（精製水は薬局で購入できます）。精製水が「下限水位」より少なくなったら補充して下さい。

洗 浄 加湿器を水洗いし、精製水を交換して下さい。

注意 加湿器のキャップと容器の ▼▲ 印の位置が合うまで締めます。装置本体加湿器収容部のガイドに加湿器のフタ部分をセットし、「カチッ」と音がするまで押し込みます。（押し込んだ後、加湿器を軽く引いてロックが掛かり、確実に接続された事を確認して下さい）。取り外しはロックレバーを押し上げながら加湿器を引き出して下さい。



酸素濃縮装置についてのお問合せ

備品の購入や機器のトラブルなど、お問合せは以下にご連絡下さい。お問合せの際は、お名前・ご利用の機器名・かかりつけ医療機関名・取扱業者名などを必ずお伝え下さい。

■ 機器のトラブルは... 24時間対応、安心の技術サポート

平日9:00~17:30 地域営業所・出張所・駐在

夜間・土日祝受付 営業所・出張所・駐在の対応日・対応時間外 受付

機器安全センター **0120-633-881**

製造販売業者
山陽電子工業株式会社

販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare
お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office
© 2019 Philips Respironics GK PN 1128008/190110 R4-W

● フィリップス・レスピロニクス合同会社は、2019年4月1日付けで株式会社フィリップス・ジャパンと合併することを予定しております。合併後の商号は、株式会社フィリップス・ジャパンとなります。

酸素濃縮装置 Dr.酸素7Lの使い方

※ 本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず装置の取扱説明書をご覧下さい。

医療機器認証番号：227AGBZX00078000

■ ご使用の際には以下の事にご注意下さい。

- ・ 停電に備え携帯用の酸素ボンベを用意しておきましょう。
- ・ 酸素濃縮装置は換気のよい所に設置しましょう。
- ・ 定期的にフィルターを掃除しましょう。
- ・ 加湿器の精製水を定期的（1週間に2～3回）に交換しましょう。

■ 酸素はおくすり! 医師の処方流量を必ず守りましょう。

酸素はおくすりと同じで、体に必要な量をおぎなう為に処方されています。しかし「息切れ」は必ずしも酸素不足だけが原因で起こるものではありません。


「息切れ」が強いからといって勝手に処方流量を変えてはいけません。



7L器 酸素濃縮装置
Dr.酸素7L

⚠ 火気からは2m以上離れてご使用下さい。

酸素自体が爆発したり、燃えたりはしませんが、燃えているものをさらに燃えやすくする性質があります。

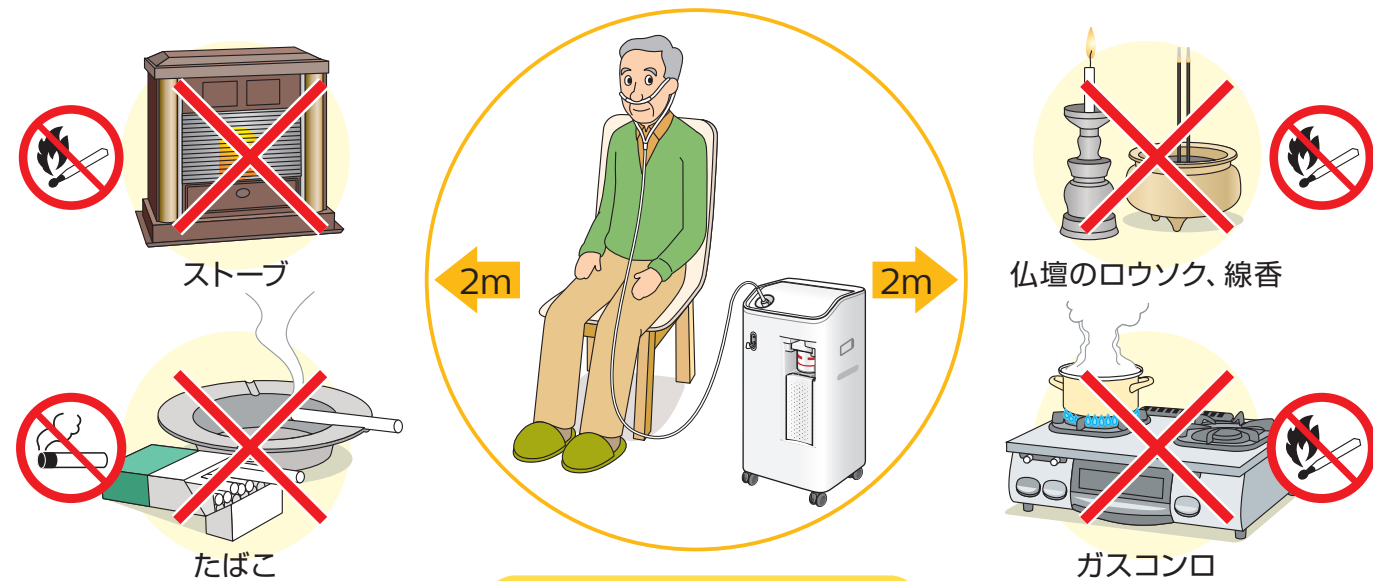

周囲2m以内に
火気を置かないで下さい



※平成元年11月8日元保安第69号通商産業省立地公害局保安課長通達
「在宅酸素療法用酸素及び装置取扱安全基準」より


たばこは厳禁!

酸素吸入しながらたばこを吸うことは、健康面からも絶対にやめましょう。カニューラに引火することもあり、大変危険です。

● カニユーラの使い方


1

カニユーラの方
向を確認し、鼻
孔に装着します。

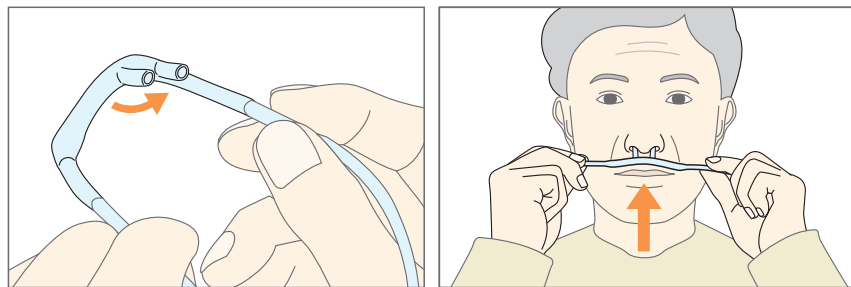


2

左右の耳にカニユーラをかけます。

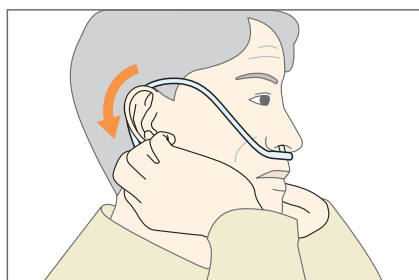


3


ストッパーを上げます。

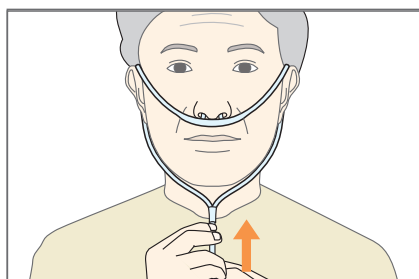


⚠ 使用前に必ずチューブの点検を行って下さい。

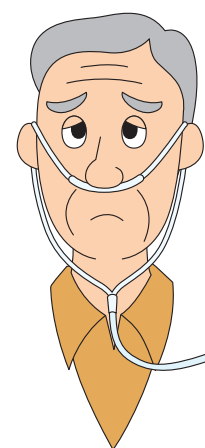


チューブに傷や穴が
開いていないか？

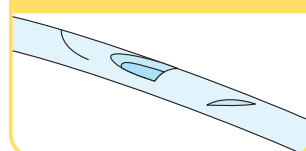


つなぎ目が
ゆるんでいないか？

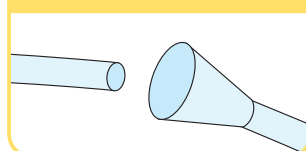


装置とチューブの
取り付け部分が
ゆるんでいないか？

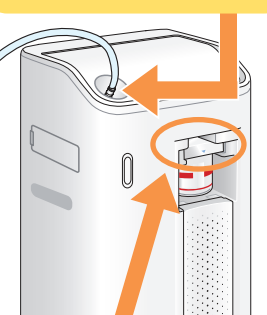

チューブにテープなど
付着していないか？

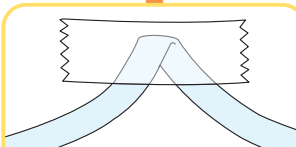

チューブが
折れていないか？

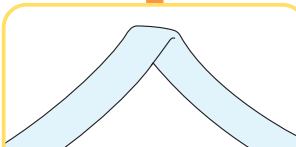

加湿器のフタが
ゆるんでいないか？

加湿器はきちんと
セットされているか？

● 酸素濃縮装置の使い方

※Dr.酸素7Lには音声ガイドが付いています。音声ガイダンスに従ってご使用下さい。

1

電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。

注意 たこ足配線（ほかの機器との併用）はやめましょう。

参考 本製品の消費電力は以下の通りです。

3.0 L / 分以下	約160 [wh]	6.0 L / 分	約330 [wh]
4.0 L / 分	約210 [wh]	7.0 L / 分	約370 [wh]
5.0 L / 分	約280 [wh]		



2


運転／停止ボタンを押して下さい。



3

酸素流量設定ボタンを押し、処方された流量に正しくセットして下さい。


確認 ①を1度押すと流量設定がロックされ、点灯します。（解除するときはもう1度押します。）

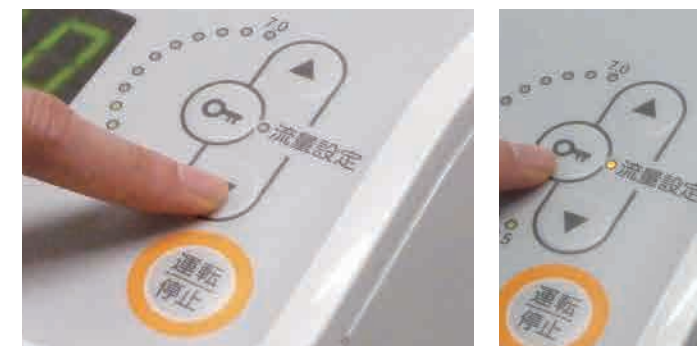

4

カニユーラを装着し、酸素吸入をはじめて下さい。

確認 酸素が流れていない？と思ったらカニユーラの鼻につける部分をコップの水に入れ、気泡（ブクブク）が出ていれば正常です。

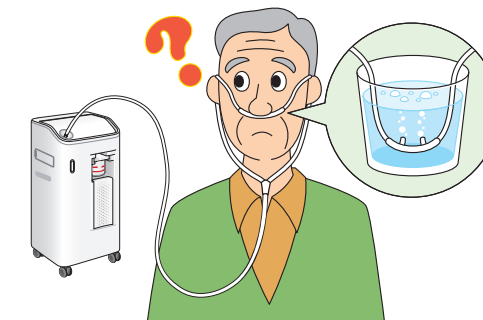

5

使用していないときは、運転／停止ボタンを押して運転を止めて下さい。

確認 医師により指示された所定時間を守って吸入して下さい。

