



DreamMapper und EncoreAnywhere

Verknüpfung eines DreamMapper-Benutzerkontos mit dem jeweiligen Patientenprofil in EncoreAnywhere

Leitfaden

1 Rufen Sie die Detailinformationen des Patienten, dessen DreamMapper-Benutzerkonto Sie mit EncoreAnywhere verknüpfen möchten, unter dem Reiter *Meine Patienten* auf. In der oberen Leiste des Reiters finden Sie das grau hinterlegte DreamMapper-Logo. Ein grau hinterlegtes Logo signalisiert, dass der Patient entweder noch kein

DreamMapper-Benutzerkonto angelegt hat, oder ein existierendes Benutzerkonto noch nicht mit EncoreAnywhere verknüpft ist.

2 Klicken Sie auf das DreamMapper-Logo um Ihren Patienten per E-Mail zur Nutzung von DreamMapper einzuladen.



- 3 Sofern Sie beim Anlegen des Patientenprofils in EncoreAnywhere noch keine Geräteseriennummer und E-Mail Adresse hinterlegt haben, werden Sie durch ein Dialogfenster nun dazu aufgefordert.

Hinweis: Eine Verknüpfung des DreamMapper-Benutzerkontos mit EncoreAnywhere setzt die Aufklärung und Einverständniserklärung des Patienten voraus!

- 4 Durch Klicken von *Klicken Sie hier, um die Geräteseriennummer des Patienten einzugeben* werden Sie zu den Verschreibungsinformationen weitergeleitet.
- 5 Geben Sie dort die Seriennummer ein und speichern Sie sie anschließend.

- 6 Klicken Sie nun wieder auf das DreamMapper-Logo.

- 7 Geben Sie die E-Mail Adresse Ihres Patienten ein und klicken Sie anschließend *Einladung senden* und schließen Sie das Dialogfenster.

Die E-Mail Adresse Ihres Patienten wird in dessen EncoreAnywhere-Profil gespeichert. Wenn Sie das DreamMapper-Benutzerkonto Ihres Patienten von EncoreAnywhere entkoppeln möchten, dann löschen Sie dazu die E-Mail Adresse unter *Verschreibungen* aus dem entsprechenden Eingabefeld.

Ihr Patient erhält nun eine Einladung zu DreamMapper per E-Mail.

