

Découvrez l'Amara View

Avec un positionnement sous le nez, l'Amara View est le seul masque naso-buccal conçu pour ne laisser aucune marque rouge sur l'arête nasale.

Confort innovant

Positionnement sous le nez conçu pour éviter les marques rouges, l'inconfort ou l'irritation sur l'arête nasale.

Champ de vision dégagé

Absence de cale frontale permettant de porter des lunettes, lire, ou regarder la télévision.

Légereté

Taille et poids réduits pour plus de confort.

Utilisation facile

Nouveau !

Mise en place et retrait rapide du masque grâce aux clips magnétiques.




1. 4 fois plus de patients adhèrent à leur traitement à 90 jours avec DreamMapper. Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur un groupe de 173 000 patients américains de la base de données EncoreAnywhere de Philips Respironics a n de déterminer si la possession de l'application DreamMapper a entraîné une différence dans le taux d'adhésion au traitement par PPC par rapport aux patients n'ayant pas DreamMapper.
2. Effect of oropharyngeal exercises on patients with moderate Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Katia C. Guimaraes¹, Luciano F. Drager, Pedro R. Genta, Bianca F. Marcondes, and Geraldo Lorenzi-Filho, publié le 19 février 2009 sur HYPERLINK «<http://www.atsjournals.org>» www.atsjournals.org
3. Interview du Docteur Daniel Piperno, pneumologue à Lyon, publiée le 10 janvier 2017 sur le site internet <http://www.allianceapnees.org>
4. Pression Positive Continue
5. Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l'inspiration et à l'expiration sans impacter l'efficacité du traitement.
6. Etude de validation d'une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1, Derris JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France
7. Validation des bénéfices du masque Amara View. Experienced OSA Patients White Paper, Internal Version_FR_PN471377_LR_Final

Amara View est un masque naso-buccal destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Les systèmes DreamStation et DreamStation Go sont destinés à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. Ces DM de classe IIa, fabriqués par Philips, sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue par Philips pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d'apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Date de mise à jour : 10/15/2018 PN1874123
Amara View Patient Brochure, French

PHILIPS

Apnée du sommeil

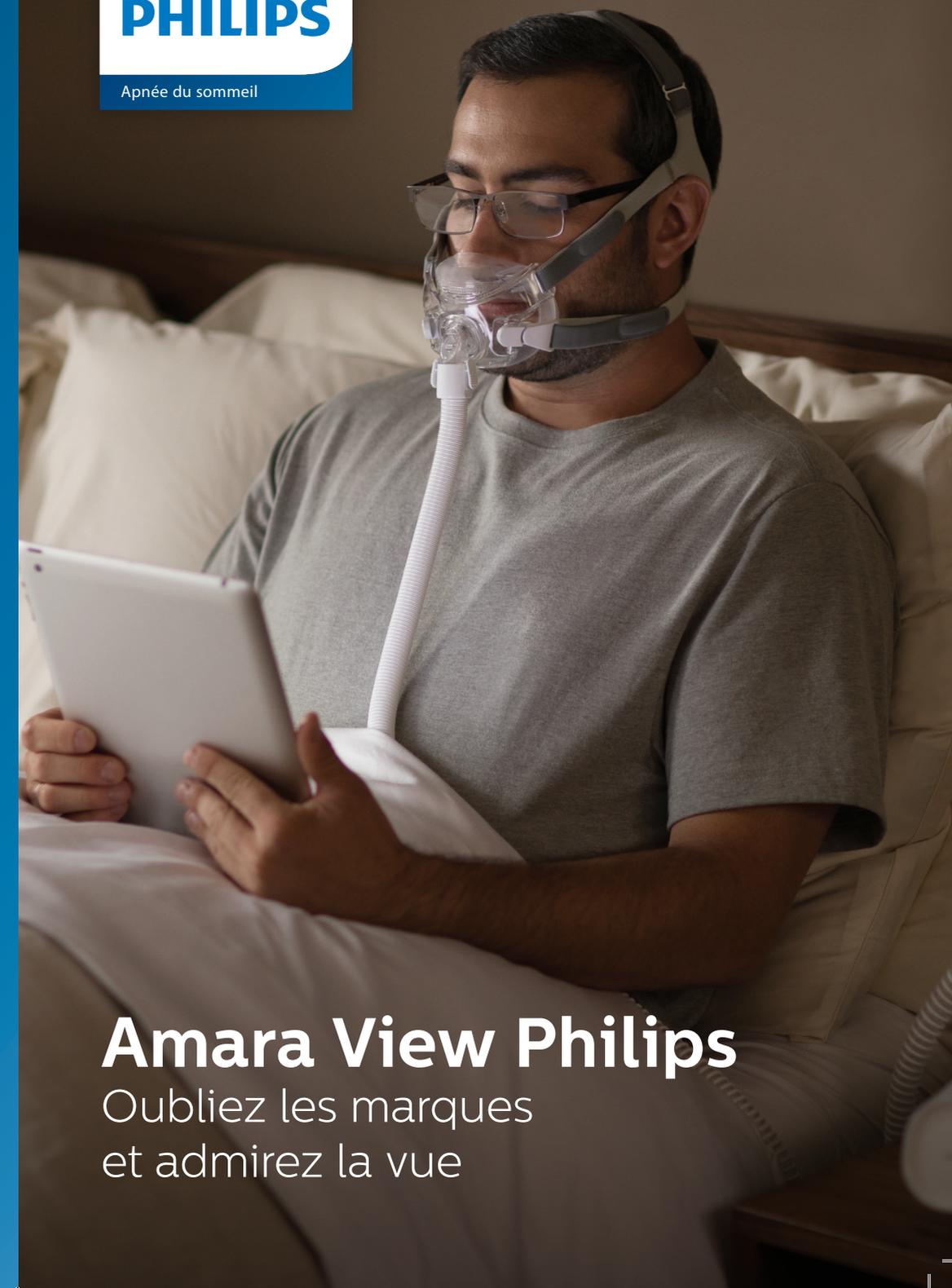

Amara View Philips
Oubliez les marques
et admirez la vue

Visualisez Amara View en  sur www.philips.fr/amaraview

Vous aider à mieux vivre le traitement

 **2 patients sur 3 rencontrent des difficultés avec le masque***

- Encombrement, claustrophobie
- Inconfort
- Marques sur l'arête nasale
- Fuites
- Impossibilité de porter des lunettes

Chez Philips, nos équipes pluridisciplinaires (cliniciens, chercheurs, designers, dermatologues...) ont pour mission de concevoir de nouvelles solutions pour vous aider à mieux vivre le traitement au quotidien.

L'Amara View a été développé pour vous offrir :

- une vision 100% dégagée
- un confort innovant
- une taille réduite et un poids léger
- plus d'étanchéité
- la possibilité de porter des lunettes

* Etude Junicon/Philips menée en France en septembre 2014 auprès de 102 patients.

Mon Amara View en 7 étapes

1



Clip du harnais

Desserrer le harnais, puis déclipser les attaches magnétiques de la coque du masque en tournant en direction opposée de la coque.

2



Position du coussin

Maintenir délicatement le masque sur votre visage et placer le coussin en dessous de votre nez. Note : ne pas placer le coussin sur votre nez, mais en dessous, juste posé sur vos narines.

3



Position du harnais

Maintenir le coussin contre votre visage et faire passer le harnais par dessus votre tête. Remonter le coussin pour positionner l'ouverture la plus large autour de votre bouche, et le haut du coussin toujours sous votre nez contre vos narines.

4



Réglage des sangles

Clipser les attaches magnétiques sur la coque du masque au niveau des clips magnétiques. Veillez à ne pas mettre vos doigts devant le clip afin de ne pas annuler le champ magnétique.

5



Mise en place du masque

Il est très important de bien régler la sangle au-dessus de la tête pour une bonne étanchéité du masque au niveau du nez. Tirer sur la sangle au-dessus de la tête pour réduire les éventuelles fuites au masque.

6



Ajustement

Tirer les sangles inférieures et supérieures vers l'arrière pour les ajuster à égalité. Ne pas serrer trop fort. Le réglage doit rester souple. Un serrage excessif est une erreur courante.

7



Connexion à l'appareil de PPC

Connecter le circuit de votre machine au clip de retrait rapide de l'Amara View.

Retrouvez nos tutoriels vidéo Amara View et les réponses à vos questions pratiques sur

www.philips.fr/amaraview



Mise en place



Gestion des fuites



Entretien

Pour une utilisation en toute sécurité, lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif.



« J'ai demandé à mon médecin de me proposer quelque chose de nouveau qui ne blesse pas⁽⁷⁾ »

Viviane, utilisatrice du masque de nouvelle génération Amara View.

Retrouvez le témoignage vidéo de Viviane sur www.philips.fr/AmaraView

Bien choisir l'appareil de PPC⁽⁴⁾ peut faciliter votre acceptation du traitement.



Choisissez la PPC adaptée à votre mode de vie :

- Discrétion du design
- La bonne pression au bon moment pour une respiration sous PPC plus naturelle^(5, 6)
- Accès facile aux données du traitement (IAH, heures d'utilisation, fuites)

Pour en savoir plus : www.philips.fr/DreamStation
www.philips.fr/DreamStation-Go

Optimiser les bénéfices du traitement par PPC.

Découvrez DreamMapper et Booster Tonic : les applications conçues par Philips pour vous aider à adopter durablement de nouveaux comportements.

- DreamMapper a été conçue pour vous aider à rester motivé et à mieux suivre votre traitement au quotidien.⁽¹⁾
- Booster Tonic a été conçue pour vous aider à reprendre une activité physique régulière et améliorer votre qualité de vie. Découvrez notamment des exercices de kinésithérapie linguale.^(2, 3)

Pour en savoir plus : www.philips.fr/dreammapper - www.philips.fr/BoosterTonic



Prenez votre traitement en main, **parlez-en à votre médecin !**