

DreamStation Go

Encore plus pratique



- ¹ Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l'inspiration et à l'expiration sans impacter l'efficacité du traitement.
- ² Étude de validation d'une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1, Dernis JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France
- ³ Dimensions : 15 cm L x 15 cm l x 5.8 cm H
- ⁴ La durée d'autonomie avec batterie peut varier selon le niveau de pression délivrée, des fuites importantes, l'altitude, la température, le chargement d'autres appareils via le port USB, et d'autres variables éventuelles. Avec la DreamStation Go réglée à 10cm de pression, un circuit de 12mm, fuite de 37 l/min, une température environnante de 23° C, et une altitude de 503 mètres, la durée moyenne d'utilisation est de 13 heures avec la batterie.
- ⁵ Validation des bénéfices du masque DreamWear. Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.
- ⁶ Validation des bénéfices de DreamMapper : Analyse rétrospective réalisée entre mars 2013 et janvier 2016, sur un groupe de 173 000 patients américains de la base de données EncoreAnywhere de Philips Respironics afin de déterminer si la possession de l'application DreamMapper a entraîné une différence dans le taux d'adhésion au traitement par PPC par rapport aux patients n'ayant pas DreamMapper.

DreamWear est un masque fabriqué par Philips destiné à servir d'interface patient dans l'application d'une thérapie PPC pour le traitement du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l'insuffisance respiratoire. Le système DreamStation et DreamStation Go est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d'apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette Réglementation, le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d'utilisation.

© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.apneesommeil.fr
MLJ 04/20/2018 PN2551127 DreamStation Go Consumer Brochure, French
Date de mise à jour : 01/05/2019



L'appareil de PPC DreamStation est agréé pour le transport en avion*



L'humidificateur chauffant

Utilisable avec de l'eau du robinet, en bouteille ou distillée



La batterie

Environ 13h d'autonomie à une pression de 10 cmH₂O avec un temps de charge de 4 à 5h

Poids de la batterie : 214g
Poids de l'appareil seul : 630g



Le micro circuit 12 mm

Compatible avec tous les masques



Les étuis de voyage

2 formats pour protéger l'appareil seul ou l'appareil et son accessoire humidificateur ou batterie. Housse lavable pour le masque et le circuit incluse



Les filtres pollen et poussières

Réutilisables ou ultra fin jetables

PHILIPS

Apnée du sommeil



DreamStation Go Philips,

prolongez facilement votre expérience de traitement en dehors de la maison !

Vous êtes souvent absent de la maison et transporter votre appareil de PPC n'est pas toujours simple. Gardez les bénéfices cliniques où que vous soyez **en choisissant l'expérience Philips DreamStation Go.**

DreamStation Go assure une continuité du traitement et permet de garder les mêmes bénéfices cliniques à la maison et en déplacement. Vous pourrez ainsi rester performant au travail, profiter de vos voyages et de vos activités favorites.



Sérénité

- **Design sobre et compact**³ pour rester discret à la maison comme en dehors
- **Jusqu'à 13 heures d'autonomie** avec la batterie rechargeable (en option)⁴
- **Écran couleur tactile** pour un accès facile à mes données de traitement



Confort

- **La bonne pression au bon moment** pour une respiration sous PPC plus naturelle^{1,2}
- **Le masque de mon choix** pour garder mes habitudes (compatible tout masque)
- **Liberté de mouvement** grâce au nouveau micro circuit 12 mm

Nouveau !

Encore plus de confort avec l'humidificateur en option de la DreamStation Go :

- Utilisation avec tout type d'eau potable (robinet, en bouteille...)
- Taille du réservoir adapté pour un air humidifié toute la nuit
- Arrêt automatique de la plaque chauffante

Ma DreamStation Go en 4 étapes

① Installation

- Placer l'appareil près de votre lit.
- Relier le masque au circuit flexible de l'appareil.
- Relier l'appareil à une source d'alimentation.

② Navigation*

Faire glisser le doigt sur l'écran tactile pour parcourir le menu et toucher du doigt pour sélectionner.



③ Mise en route

- Appuyer sur le bouton  pour démarrer le traitement.
- La pression délivrée s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez ajuster certains réglages de confort.

④ Arrêt

- Appuyer sur le bouton  pour arrêter le traitement.
- Un bilan quotidien permet de visualiser l'évolution sur 3 nuits.

DreamSolution

Le choix d'une solution complète pour une nouvelle sensation de liberté.



www.philips.fr/DreamWear



www.philips.fr/DreamMapper



www.philips.fr/DreamStation-Go



« Utilisant un appareil CPAP depuis 6 mois. J'ai fait l'essai de 4 différents masques pour finalement opter pour le DreamWear que je trouve très confortable. J'apprécie sa conception unique avec le circuit au-dessus de la tête et l'air pouvant circuler des deux côtés du masque ou d'un seul côté dépendamment de la position dans laquelle on dort. »⁵



« La nouvelle machine est beaucoup plus pratique. Elle est plus petite à transporter. C'est plus joli et ergonomique. Ça change la perception que nous avons du traitement. »



« Une semaine que j'ai l'appareil et l'application est complémentaire afin de visualiser la progression de son apnée. »⁶

Les différentes options dans le menu patient.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez parcourir les cinq options suivantes :



*La navigation ne peut se faire que lorsque l'appareil n'est pas en cours de traitement.

**N'apparaît que si la batterie DreamStation Go est connectée.



Partagez votre expérience de la DreamSolution Philips !
www.apneesommeil.fr